



Accent *Prime*

Love Your Shape

SIGNIFIKANT KÜRZERE
BEHANDLUNGSZEITEN

KOMBINIERTE TECHNOLOGIEN
FÜR BESSERE, LANGANHALTENDE
ERGEBNISSE

KLINISCH BEWÄHRT IN
ZAHLREICHEN STUDIEN

SCHNELL, EINFACH ZU BEDIENEN,
PLUG & PLAY TECHNOLOGIE

KEINE EINWEGARTIKEL



HOLEN SIE DAS BESTE AUS IHREN KUNDEN HERAUS

Almas Accent Prime™ ist das modernste System zur Hautverjüngung sowie zur Formung und Straffung von Gesicht und Körper. Die Plattform vereint die neuesten Entwicklungen aus der Ultraschall- und der Radiofrequenz-Technologie und bietet so wirksame, individuell anpassbare Behandlungen mit natürlich aussehenden, langanhaltenden Ergebnissen.

Auf der Basis mehrjähriger Erfahrung und großem klinischem Erfolg im Bereich der Körperformung bietet Alma nun mit Accent Prime die neueste Generation der erfolgreichen Accent-Familie, die gezielt die Fettzellen anspricht und zugleich das Kollagen im Gewebe strafft und durch die Synergie aus verschiedenen Technologien optimale Ergebnisse erzielt.

Dank einer breiten Auswahl an Applikatoren und Behandlungsmethoden können Sie Ihren Patienten individuell zugeschnittene Lösungen je nach Hauttyp und Indikation anbieten. Technologische Innovationen bieten zugleich neues Potential, wie Behandlungen zur Körperformung, dem Body Contouring, in beispielloser Geschwindigkeit - für kürzere Behandlungszeiten und noch bessere Ergebnisse.

Accent Prime ist ein System von Alma Lasers, einer weltweit anerkannten Marke für medizinisch ästhetische Technologien. Alma ist führend auf diesem Gebiet mit nachgewiesenem klinischem Erfolg und einwandfreier Sicherheit sowie FDA-Zulassung für die Accent Familie zur Körperformung seit 2007. Mit Accent Prime sind Sie stets in guten Händen - mit Ihren Patienten und Ihrer Praxis!

"Accent Prime, das jüngste Mitglied der Accent Produktfamilie, bietet das neue UltraSpeed Handstück mit einer speziellen Ultraschall-Technologie mit geführten Schallwellen. Diese Innovation reduziert die Behandlungszeit auf die Hälfte!"

Dr. Ziv Karni, CEO & Gründer, Alma Lasers

Neueste Entwicklungen

Die neueste Generation der Körperformung mit wegweisenden technologischen Verbesserungen.

UltraSpeed




Das UltraSpeed Handstück kombiniert eine neue Art von Ultraschall-Technologie mit einer besonders großen Applikator-Platte zur extrem schnellen Körperformung - auch Body Contouring genannt. Diese Technologie ist exklusiv nur auf Almas bahnbrechender Plattform Accent Prime erhältlich. UltraSpeed bietet eine plattenförmige Sonotrode, welche in konzentrischer Form geführte Ultraschallwellen abgibt, um das Zielgewebe zu erwärmen. Die Ultraschall-Energie wird homogen auf die gesamte, 300 cm² große Behandlungsfläche abgegeben und bekämpft dort gezielt hartnäckige Fettzellen. Die Behandlung des kompletten Abdomen dauert mit UltraSpeed nur noch rund 20 Minuten, was den Komfort für den Anwender erheblich steigert.




UltraSpeed Handstück

"Das neue UltraSpeed-Handstück liefert durch seine hohe Abdeckungsrate optimale Ergebnisse. Histologien belegen eindeutig die Schädigung der Fettzellen in der Hypodermis."

Dr. Joseph Lepselter, Vice President Clinical Affairs, Alma Lasers

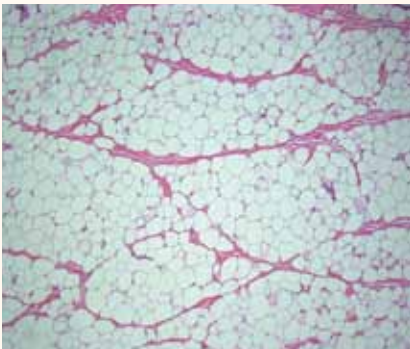

Normale Fettzellen in der Hypodermis

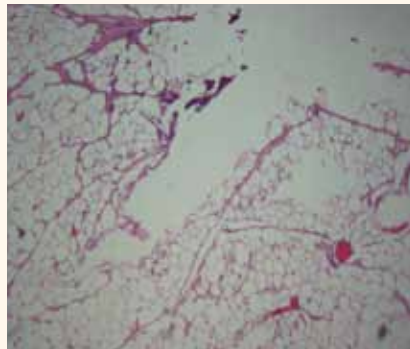

Abnormal - geschädigte Fettzellen

Tune Face & Tune Body

Accent Prime ist mit neuen stationären RF-Applikatoren mit besonders hoher Leistung ausgestattet, die durch einen gekühlten Vakuum-Mechanismus die Wirksamkeit der Behandlung maximieren. Die Vakuum-Technologie isoliert das Behandlungsareal und erfasst die Flüssigkeiten im Gewebe in einem einzigen, definierten Bereich. Die eingebrachte RF-Energie verursacht dann einen thermischen Schock im Gewebe, während die Kontaktkühlung die Hautoberfläche schützt und den Patientenkomfort erhöht. Die Behandlung ist durch diese einzigartige Kombination fokussierter und konzentrierter, die Behandlungsdauer und Zahl der Sitzungen werden reduziert und die Ergebnisse deutlich verbessert.




KOMBINIERTE TECHNOLOGIEN FÜR LANGANHALTENDE ERGEBNISSE

Effektiv *Dielektrische Erwärmung*

Accent Prime nutzt die dielektrische Erwärmung - einen einzigartigen Mechanismus, mit dem Radiofrequenzenergie von 40,68 MHz (40,68 Millionen Schwingungen pro Sekunde) direkt in das Gewebe übertragen wird. Sie verursacht im Gewebe eine schnelle Oszillation der Wassermoleküle, die daraus resultierende Reibung erzeugt hochwirksame Wärme genau in der gewünschten Zielstruktur.

Da die Haut vor allem aus Wasser besteht, verursacht diese Erwärmung volumetrische Kontraktionen in der Haut, wodurch die bestehenden Fasern zusammengezogen und die Bildung von neuem Kollagen stimuliert sowie seine Dicke und Ausrichtung verbessert werden. Die tiefe, gleichmäßige Erhitzung mit Accent Prime erzielt überzeugende, einheitliche Resultate.

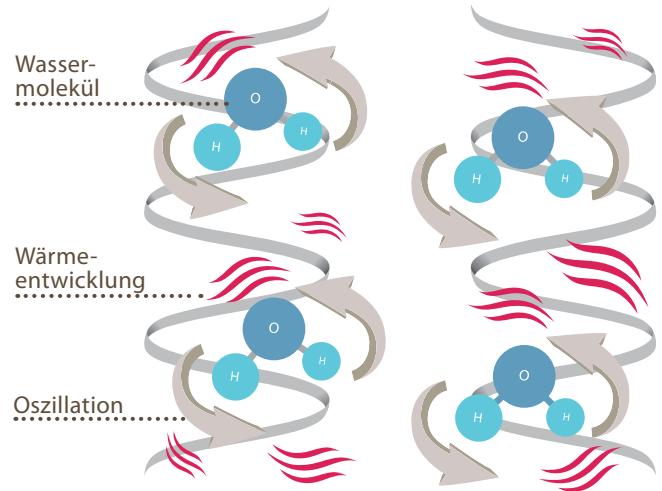

Leistungsstark *Impedanz-Anpassung*

Mit einer hohen Leistung von bis zu 300 Watt und minimalem Energieverlust durch Anpassung an die Impedanz (Wellenwiderstand der Haut), bietet Accent Prime die maximale Power für jede Behandlung. Denn wenn RF Energie an das Gewebe abgegeben wird, führt der elektrische Widerstand des Körpers dazu, dass ein Teil der Leistung an der Haut zurück zur Energiequelle reflektiert und damit unwirksam wird. Mit der höchsten Spitzenleistung auf dem Markt überwindet Accent Prime diese Impedanz des Körpers, reduziert die Reflexion und bringt so die maximale Energie in das Zielgewebe ein.

Tief *UniPolar™*


Almas patentierte¹ Unipolar-Technologie erlaubt die fokussierte, sichere und tiefe Erwärmung des Gewebes in variablen Tiefen der Haut.

Unipolar arbeitet mit einer einzelnen Elektrode, die konzentrierte RF Energie in tiefere Gewebeschichten einbringt - ohne unangenehme Begleiterscheinungen für die Patienten.

Fokussiert *Tiefenkontrolle*

Durch Accent Primes Technologie zur Tiefenkontrolle lässt sich die Eindringtiefe der Energie und damit die Behandlungstiefe flexibel und präzise auf die relevanten Gewebeschichten anpassen, was die Ergebnisse der Behandlung optimiert.

Diese Auswahl von tiefen und oberflächlichen Ansätzen bietet für jeden Patienten und jedes Areal, je nach Hauttyp und Dicke der Haut sowie je nach Indikation individuell die ideale Behandlung. Oder wählen Sie eine Kombination beider Ansätze auf dem selben Areal, um die Ergebnisse der Behandlung noch weiter zu verbessern.

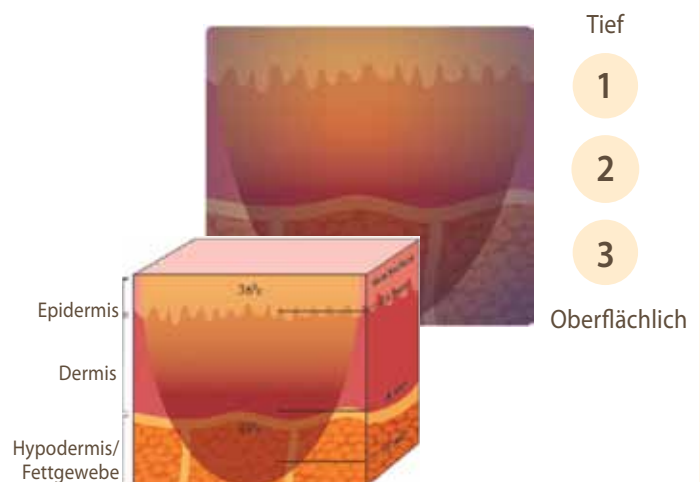

Zielt auf die Fettzellen ab

Kalter & Heißer Ultraschall

Accent Prime bietet die patentierte² Cold Shear Wave Technologie mit kaltem Ultraschall zur selektiven Behandlung der Fettzellen ohne Schädigung des umliegenden Gewebes. Die Membran der Fettzellen wird zerrissen und die allmähliche Freisetzung von gespeichertem Fett ausgelöst. Die zerstörten Fettzellen werden dann vom Körper über das Lymphsystem abgebaut. Accent Prime bietet zudem heißen Ultraschall, welcher mit Druckwellen ein hohes Maß an Kavitation erzeugt und lokale Fett-Depots somit thermisch aufbrechen kann. Anwender können mit ein und demselben Handstück mit kaltem (shear) oder warmem (hot) Ultraschall arbeiten – oder mit einer Kombination aus beidem für noch bessere Ergebnisse.

Fraktioniert *Microplasma™*

Mit seiner einzigartigen Microplasma Technologie bietet das Accent Pixel RF™ Handstück eine Behandlung zur Hautverjüngung durch fraktionierte Ablation und Erwärmung des Gewebes. Dieser sanfte, fraktionierte Ansatz reduziert das Risiko von Nebenwirkungen wie der postentzündlichen Hyperpigmentierung (PIH). Durch kontrollierte Perforation und das fokussierte Einbringen von Energie behandelt Pixel RF nur das betroffene Areal und lässt das umliegende, gesunde Gewebe intakt. Die Haut heilt schneller ab, da die Epidermis sich ideal regenerieren kann, die Ausfallzeit ist deutlich verkürzt.

IMPACT™ (Transepidermale Durchdringung)

Um die klinischen Ergebnisse der RF- und Ultraschall-Behandlung zu bewahren und zu optimieren, nutzt das patentierte³ IMPACT™ Handstück Ultraschall-Energie, um aktive Substanzen über die epidermal-dermale Hautbarriere hinaus tief in das Gewebe einzubringen. Nach der Perforation der Haut mittels Mikroplasma (Pixel RF) nutzt IMPACT intermittierenden positiven und negativen Schalldruck, um topische Wirkstoffe durch diese Mikro-Kanäle und gegen den Druck der dort angestauten intrazellulären Flüssigkeit in die Haut einzubringen. Die oszillierende akustische Vibration erzeugt einen Push-Pull-Effekt in den Kanälen, welcher die gestaute Flüssigkeit sowie die aktiven Substanzen tief in das Gewebe eindringen lässt.

IHRE VORTEILE



SELEKTIV

Fokussierte, kontrollierte Behandlung in variabler Tiefe für optimale Ergebnisse ohne Schädigung des umliegenden Gewebes.



SICHER

Behandlungen mit Accent Prime sind sicher und wirksam bei allen Hauttypen (I-VI) und für alle Bereiche des Körpers, einschließlich empfindlicher Areale im Gesicht, am Hals und im Dekolleté.



KOMBINIERTE TECHNOLOGIEN

Kombinieren Sie die Technologien und Behandlungsmöglichkeiten für schnellere und länger anhaltende Ergebnisse in weniger Sitzungen.



KOMFORTABEL

Eine schrittweise Erwärmung und die integrierte Kühlung erhöhen spürbar den Patientenkomfort.



KEINE AUSFALLZEIT

Die Patienten können sofort wieder ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen.

INDIKATIONEN

Formung von Gesicht und Körper

Accent Prime bietet eine wirksame Lösung gegen Fetteinlagerungen und erschlaffte Haut, welche die Kontur von Gesicht und Körper sichtbar verbessert. Die Synergie aus RF- und Ultraschall-Technologien liefert hierbei wesentlich bessere Ergebnisse, als jede Technologie für sich genommen. Kalte Ultraschall-Wellen zerstören selektiv Fettzellen, unipolare RF-Energie beschleunigt den Stoffwechsel für eine schnellere Lymphdrainage. Die anschließende Applikation von warmer RF-Energie kontrahiert das Gewebe, strafft die Haut und verbessert ihre Textur durch den Aufbau von neuem Kollagen.

Handstücke

UltraSpeed - bietet eine neue Art von Ultraschall-Technologie mit geführten Ultraschall-Wellen sowie einen extra großen Applikator zur Straffung von besonders großen Arealen.

UltraFace - vereint kalten Ultraschall (shear waves) und eine Ultraschall-Technologie mit Druckwellen zur Formung des Gesichts. Der Ultraschallkopf ist dabei auf einer Sonotrode fixiert und bringt die Energie tief in das Gewebe ein.

UltraBody - vereint kalten Ultraschall (shear waves) und eine Ultraschall-Technologie mit Druckwellen mit hoher Leistung zur Körperformung.

UniBody - vereint die UniPolar RF-Technologie mit einem abnehmbaren Massage-ring zur Erwärmung tieferer Gewebeschichten mit Anregung der Zirkulation im Unterhautgewebe.

"Die Formung des Gesichts ist eine Schlüssel-Behandlung auf dem Anti-Aging-Gebiet. Durch die Kombination aus einzigartigem kaltem Ultraschall und Radiofrequenz liefert Almas Accent exzellente Ergebnisse bei Fett-Depots und erschlaffter Haut in nur einer Behandlung - und gibt den Patienten tatsächlich ein jünger aussehendes Gesicht zurück."

Dr. Maria Claudia, Almeida Issa, Brasilien

Hauterneuerung und Hautverjüngung

Ein ungleichmäßiger Teint, Dehnungsstreifen, oberflächliche Pigmentveränderungen und raue, unebene Haut lassen sich mit der fokussierten Mikroplasma-Technologie von Accent Prime wirksam behandeln. Die Kombination mit der Impact-Technologie optimiert dabei die Ergebnisse der Haut-Reparatur.

Handstücke

Microplasma - Pixel RF dient der fraktionierten Ablation sowie der Erwärmung des Gewebes durch die Mikroplasma-Technologie.

Microplasma + IMPACT - die Kombination aus fraktionierter Behandlung und Ultraschall für noch bessere Ergebnisse.



Mit freundlicher Genehmigung der Klinischen Abteilung von Alma Lasers



Mit freundlicher Genehmigung von Lehaviv Akerman, MD, Head of Dermatology Department Rothchild Medical Center, Israel

Hautstraffung

Altersbedingte Unebenheiten der Haut wie Falten und feine Linien sowie nachlassende Spannkraft sind oft eine echte Herausforderung – nicht aber für Accent Prime! Die Behandlungen wirken effektiv bei bestehenden Indikationen und wappnen die Haut zugleich besser gegen künftige Alterungsprozesse.

Handstücke

CoaxiPolar - zur lokalen, oberflächlichen Erwärmung an sensiblen Arealen, mit Temperatur-Messung in Echtzeit.

UniLarge - UniPolar RF-Handstück zur Straffung der Kollagen-Fasern in der Tiefe und Stimulation der Kollagen-Neosynthese.

UniFace - UniPolar RF-Handstück, eigens entwickelt zur Behandlung des Gesichts.

Periorbital - strafft erschlaffte Haut speziell um die Augen.

Tune Body - Vakuum-unterstützte fraktionierte RF-Technologie zur Hautstraffung am Körper.

Tune Face - Vakuum-unterstützte fraktionierte RF-Technologie zur Hautstraffung im Gesicht.



Mit freundlicher Genehmigung von KeeLee Tan, MD.
Rejuvenate Clinic, Perth, Australien

"Almas Technologie zur Impedanz-Anpassung an die Haut ermöglicht das Einbringen der maximalen RF-Energie in das Zielgewebe. In Kombination mit der einzigartigen Tiefenkontrolle kann die Energie im subdermalen Gewebe fokussiert werden, was die Epidermis schützt. Diese Methode ist sicher und einfach anzuwenden."

KeeLee Tan, MD.
Rejuvenate Clinic, Perth, Australien

Cellulite

Vergrößerte Fett-Depots unter der Hautoberfläche verursachen das unebene Hautbild der Cellulite. Durch die Kombination aus RF-Energie und mechanischer Massage kann Almas Accent Prime den Stoffwechsel in diesem Gewebe stimulieren, das Volumen der Fettzellen reduzieren, die Lymphdrainage anregen und so die Textur der Haut sichtbar glätten.

Handstücke

UniForm - kombiniert die hochenergetische UniPolar RF-Technologie mit einem abnehmbaren rotierenden Massagering zur Erwärmung der tiefen Hautschichten, Anregung der Blutzirkulation im Unterhautgewebe und Verbesserung des Erscheinungsbildes von Cellulite.

UniLarge - nutzt die UniPolar RF-Technologie zur Anregung des Stoffwechsels im Gewebe und zur Hautstraffung.



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. JD McCoy, Contour Medical, Gilbert / Arizona, USA

Alma Accent Prime

Love Your Shape

Alma Lasers ist ein führender Anbieter von Laser-, Licht-, Radiofrequenz- und Ultraschall-Technologien für die Ästhetik, Dermatologie und Chirurgie.

Unsere Anwender bieten sichere und wirksame Behandlungen an, und ihre Patienten profitieren von hochmodernen, klinisch bewährten Lösungen.

Alma Lasers GmbH

Nordostpark 100-102
90411 Nürnberg, Deutschland
Tel. + 49-911 / 89-11-29-0
Fax + 49-911 / 89-11-29-99

info@alma-lasers.de
www.alma-lasers.de

© 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Accent, Alma, das Alma Firmenzeichen, Alma Lasers, Accent Prime, Impact, Microplasma, Pixel, Unipolar und Ultra sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Alma Lasers Ltd. in den USA und/oder anderen Ländern.

www.almaaccent.de

PBAC17021601

Folgen Sie
Alma Lasers



¹Alma Accent Unipolar RF ist geschützt durch US-Patente Nr. 7630774, 8150532 und Europäisches Patent Nr. 1715810. Weitere Patente und ausstehende Patente in den USA und/oder anderen Ländern. ²Alma Accent Ultra Produkte sind geschützt durch US-Patent Nr. 8579835 und Europäisches Patent Nr. 2252369. Weitere Patente ausstehend in den USA und/oder anderen Ländern.

³Alma Accent Impact Produkte sind geschützt durch Europäisches Patent Nr. 2459268; Weitere Patente und ausstehende Patente in den USA und/oder anderen Ländern.