

Alma
Accent Prime
Love Your Shape

**FETTREDUKTION UND
HAUTSTRAFFUNG OHNE OP -
FÜR NATÜRLICH SCHÖNE KURVEN**

20
MIN.

SCHNELLE BEHANDLUNG



ANGENEHM UND SCHMERZFREI



SICHER UND ZUVERLÄSSIG

I-VI

FÜR ALLE HAUTTYPEN



OHNE AUSFALLZEIT



Glatte Haut und straffe Konturen. Schmerzfrei, ohne Operation und einfach in der Mittagspause.

*Holen Sie sich jetzt Ihr Selbstvertrauen zurück -
mit Accent Prime von Alma Lasers!*

Finden Sie sich nicht länger mit hartnäckigen Fettpölsterchen, erschlaffter Haut im Gesicht und am Körper oder unschönen Dehnungsstreifen ab, sondern holen Sie sich jetzt Ihre natürliche Schönheit zurück. Und das schnell und bequem und ohne die Schmerzen und Ausfallzeit invasiverer Methoden wie einer Operation.

Accent Prime kombiniert modernste Radiofrequenz- und Ultraschall-Technologien zur Hautstraffung im Gesicht und am Körper, zur Fettreduktion und Körperformung, zur Hauterneuerung und Hautverjüngung sowie zur Reduktion von Cellulite und Dehnungsstreifen mit natürlich aussehenden, lang anhaltenden Ergebnissen.

Zehn Jahre Erfahrung, zahlreiche klinische Studien und mehrere Tausend zufriedene Patienten belegen die Sicherheit und Wirksamkeit der Accent-Produktfamilie bei der Hautstraffung, der Anregung der Kollagen-Neubildung und der Formung des gesamten Körpers.



*"Meine Kunden sind von der Accent Prime
Behandlung durchweg begeistert. Erste
Ergebnisse sind oft schon nach einer
Sitzung sichtbar, und ideal nach
drei oder vier Behandlungen."*

Ewa Duhnke, Ewa Duhnke Cosmetics, Hamburg

DIE VORTEILE DES ACCENT PRIME



VIELSEITIG WIRKSAM

Zur Formung & Straffung von Gesicht und Körper, zur Hautverjüngung und zur Reduktion von Cellulite und Dehnungsstreifen



SCHMERZFREIES VERFAHREN

Während der Behandlung verspüren Sie lediglich ein Wärmegefühl



SCHNELLE BEHANDLUNGEN

nur 20 Minuten für ein Body Contouring des unteren Bauchs



SICHER UND ZUVERLÄSSIG

Auch für empfindliche Areale wie Gesicht, Hals und Dekolleté



FÜR ALLE HAUTTYPEN, 365 TAGE IM JAHR

Egal ob helle, dunkle oder gebräunte Haut - Accent Prime Behandlungen sind das ganze Jahr über möglich



KEINE AUSFALLZEIT

Sie können gleich nach der Behandlung Ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen



Die Behandlungsmöglichkeiten

Formung von Gesicht & Körper

Accent Prime beseitigt hartnäckige Fettpölsterchen und verbessert sichtbar die Form und Kontur des Gesichts und Körpers.

Die Kombination aus Ultraschall- und Radiofrequenz-Technologien erzielt überragende Ergebnisse und gibt Ihnen eine natürlich aussehende, schöne Kontur zurück. Sie sehen schlanker aus und fühlen sich endlich wieder wohl in Ihrem Körper.



Mit freundlicher Genehmigung von Viola Aladag, Berlin

Cellulite-Reduktion

Die unregelmäßige Hautoberfläche mit unschönen Dellen, die Cellulite mit sich bringt, ist eine große Herausforderung und Last für unzählige Frauen.

Zwar bietet der Markt eine Vielzahl an Lösungen, jedoch sind die wenigsten tatsächlich wirksam. Accent Prime bietet eine klinisch bewährte Lösung, die das Erscheinungsbild der Cellulite tatsächlich nachweislich und wirksam verbessert.



Mit freundlicher Genehmigung von Revsan Mendanlioglu, POUR FEMME Osnabrück

Hautstraffung

Mit den Jahren verliert die Haut an Spannkraft und Festigkeit. Erste Zeichen dieser Hautalterung sind feine Linien, Falten und erschlaffte Haut.

Accent Prime nutzt leistungsstarke Radiofrequenz-Energie zur Festigung und Straffung von reiferer Haut im Gesicht und am Körper. Die Behandlung stärkt die Kollagenfasern in der Haut und schenkt Ihnen glattere, jünger und gesünder aussehende Haut.



Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Sophia Bethge, Metropolitan Aesthetics Berlin

Hautverjüngung

Mit dem Alter verändern sich Teint und Textur der Haut und es zeigen sich erste Unregelmäßigkeiten.

Accent Prime nutzt eine Mikroplasma-RF-Technologie, um die Haut zu glätten und wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die Behandlung verbessert Teint und Struktur der Haut insgesamt, reduziert oberflächliche Pigmentveränderungen und wappnet die Haut zugleich gegen künftige Alterungsprozesse.



Mit freundlicher Genehmigung von Lehaviv Akerman, MD,
Head of Dermatology Department Rothchild Medical Center, Israel

Die Behandlungsmöglichkeiten

Dehnungsstreifen

Wird die Haut überdehnt, z.B. durch eine Schwangerschaft, einen Wachstumsschub oder eine starke Gewichtszunahme, können sich Risse bilden, die sogenannten Dehnungsstreifen.

Accent Primes Mikroplasma-Technologie reduziert diese unschönen Dehnungsstreifen sichtbar in wenigen Behandlungen. Die Mikroperforation der Haut sorgt für eine sanfte, stufenweise Erneuerung der Hautoberfläche.

Eine zusätzliche RF-Behandlung zur Anregung der Kollagenneubildung kann die Ergebnisse optimieren.

"Die Ergebnisse des Accent Prime sind verblüffend. Bereits nach einer Behandlung mit dem UltraSpeed-Handstück bemerken wir einen deutlichen Umfangsverlust im Bereich des Bauches. Unsere Patienten empfinden die Behandlung als sehr angenehm und schmerzfrei, sie ähnelt einer wärmenden Massage.

Auch bei der Hautstraffung sowie bei Kombinationsbehandlungen mit Fadenlifting, Unterspritzung oder nach einer Fettabsaugung erzielen wir gute Erfolge."

Dr. Sophia Bethge, Plastische Chirurgin,
Metropolitan Aesthetics, Berlin



Mit freundlicher Genehmigung von Öznur Ayhan, Secret Beauty Freiburg

Ergebnis nach 1 Kombinationsbehandlung aus Mikroplasma, Radiofrequenz und Saugpump-Massage



Mit freundlicher Genehmigung von Revsan Mendanlioglu, POUR FEMME Osnabrück

Ergebnis nach 1 Kombinationsbehandlung aus Radiofrequenz und Ultraschall

Vor und nach der Behandlung - was ist zu beachten?

Vor der Behandlung

Es ist keine spezielle Vorbereitung erforderlich. Für die Ultraschall-Behandlung wird Vaseline als Kontaktmittel aufgetragen, für die Radiofrequenz-Behandlung ein wasserfreies Öl.

Während der Behandlung

Während der Behandlung wird die Haut auf 39 - 42°C erwärmt. Diese intensive Wärme ist bei Radiofrequenz- und Ultraschall-Behandlungen spürbar, jedoch nicht schmerzhaft. Die Haut wird gerötet ähnlich einem leichten Sonnenbrand, dies klingt jedoch nach wenigen Stunden ab.

Nach der Behandlung

Trinken Sie nach der Behandlung in den nächsten Tagen ausreichend Wasser, um den Abtransport des Fetts über das Lymphsystem zu unterstützen. Die Behandlung erfolgt in einem Zyklus von 4-6 Sitzungen oder bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist in einem ein- bis zweiwöchigen Intervall.

Sie können direkt nach der Behandlung Ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen, einschließlich Sonnenbädern oder einem Besuch im Solarium.

Keine Behandlung sollte erfolgen...

...wenn Sie zum Behandlungszeitpunkt schwanger sind, einen Herzschrittmacher tragen oder unter Hauterkrankungen wie Psoriasis leiden. Verzichten sollten Sie auch bei erhöhtem Blutdruck, Hepatitis, Thrombophlebitis, einem Leistenbruch u.a.

Die Mikroplasma-Behandlung

Die Mikroplasma-Behandlung erzeugt ein brennendes, unangenehmes Gefühl, das bei einer Kühlung der Haut gut zu tolerieren ist. Vor der Behandlung kann zusätzlich eine schmerzlindernde Creme aufgetragen werden. Die Behandlung verursacht kleine Verletzungen und damit Krüstchen auf der Hautoberfläche sowie eine Rötung, was für einige Tage nach der Behandlung sichtbar bleibt. Verzichten Sie für ca. zwei Wochen auf Sonnenbäder und Solariumsbesuche.



Accent Prime
Love Your Shape

Alma
Lasers™

Accent Prime ist die neue Plattform zur Formung und Straffung von Alma Lasers, einem der weltweit führenden Anbieter von Laser-, Licht-, Radiofrequenz- und Ultraschall-Systemen für die Ästhetik, Dermatologie, Chirurgie und Kosmetik. Erleben auch Sie die sicheren und wirksamen Alma Lasers-Methoden mit modernsten, klinisch bewährten Technologien und Behandlungslösungen.

Fragen Sie uns nach der Behandlung mit Accent Prime zur Formung und Straffung von Gesicht und Körper - wir beraten Sie gerne!

www.almaaccent.de

© 2017 Alma Lasers. Alle Rechte vorbehalten.

Alma Lasers, das Firmenzeichen, Alma, Accent, IMPACT und UniPolar sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen von Alma Lasers in den USA und/oder anderen Ländern.

Kundenbroschüre Accent Prime, Art.-Nr. 68011029, Rev.1

Folgen Sie
Alma Lasers

